

DIZALO

MANUALLY OUTDOOR



BRUKSANVISNING



WWW.ERGOSEAT.NO

BRUKSANVISNING

DIZALO

Gratulerer med et Dizalo understell fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med understell og funksjonaliteten, enten du er bruker, ledsager, eller forelder. Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisningen før dette understell tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god å sett det tilbake der du fant det.



Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på www.ergoseat.no



TILPASNINGER

1. SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på understellet er låst, og at setet er godt festet til understellet før du setter bruker i setet.



2. ENDRE TILT

Tilt understellet bakover ved å trekke opp hendelen på kjøre håndtaket.

Beveg så understellet til ønsket posisjon, slipp deretter justerings hendelen!



3. JUSTERING AV HØYDE

Understellet kan enkelt justeres i høyden. På akslingen er det en hev/senk pedal. Pump pedalen med foten for å heve understellet. Dra pedalen opp og hold for å senke understellet.




4. JUSTERING AV FOTBRETT

Vinkel Fotplaten kan også justeres. Det gjøres ved å løsne 1 stk 5mm unbrako på hver side. Beveg så fotplaten til ønsket posisjon. Skru så til 5mm unbrako



Høyde fotbrettet justeres ved å løsne 2 stk 5mm unbrako. Beveg så fotbrettet til ønsket posisjon. Skru så til 5mm unbrako.

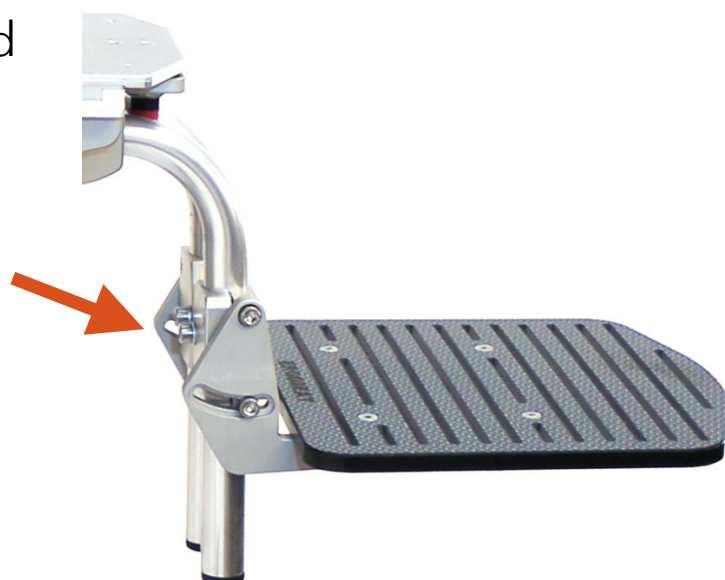

Kortere legg lengde

Løsne de 4 skruene på fotbrettet. Ligg fotbrett platen til sides, deretter løsne 2 stk 5mm unbrako og dra deretter fotbrett innfestningen av fotbrett stangen.

Plasser fotbrett innfestningen opp-ned og fest 2 stk 5mm unbrako. Plasser deretter fotbrett platen på og skru til de 4 skruene.



Lang



Kort

VEDLIKEHOLDSANVISNING

KONTROLL AV SLITASJE

Kontroller alltid festepunkter og fiksering for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på understellet bør sjekkes jevnlig og etter strammes ved behov

ETTERTILPASNING

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres på understellet.

SIKKERHET

Av sikkerhetsmessig grunn skal understellet ikke transporteres over terskler eller hindringer høyere en 0.5 cm med bruker i. Ved forsering av terskler eller hindringer må det utvises stor forsiktighet.