

SOLIDSEAT

MED SPIDER



ERGOSEAT

BRUKSANVISNING



WWW.ERGOSEAT.NO

BRUKSANVISNING SOLIDSEAT

Gratulerer med ditt nye sete fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisningen før dette produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god og sett det tilbake i plastlommer der du fant det.



| | |
|----------------------|--------------------|
| Produkt : | Ansvarlig terapeut |
| _____ | _____ |
| Spesialtilpasset til | HMS |
| _____ | _____ |
| Tilbudsnr | Leveringsdato |
| _____ | _____ |



Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på www.ergoseat.no




POSISJONERING

Riktig posisjonering er avgjørende for at setet skal fungere trykkavlastende!


1. SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på setet er låst, og at setet er godt festet til understellet.

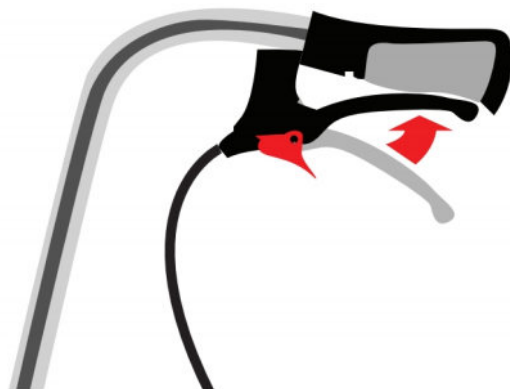

2. LØSNE HOFTEBELTE OG TILT BAKOVER

Tilt setet bakover og løsne hoftebelter, slik at de henger ut på hver side.

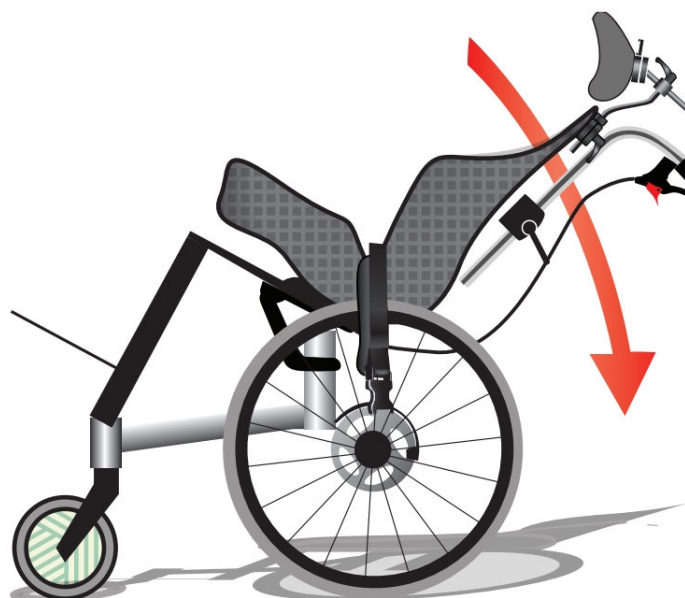

3. PLASSER BRUKER

Det er viktig at bruker kommer helt ned i setet, og flere teknikker finnes for dette. Ved bruk av seil prøv å senke personen som anvist. Ved manuell løfting, forsøk å justere personen inn i setet til du er sikker på at **korrekt posisjon er oppnådd**.




! Att bruker sitter korrekt i setet er essensielt for at setet skal fungere trykkavlastende


4. POSISJONER HOFTEBELTE

Hoftebeltet skal posisjoneres over hofte, og trykket skal gå som anvist på bildet.

! Hoftebeltet skal stramme nedover, og sikrer at posisjonen oppnådd i punkt 3 beholdes over tid.


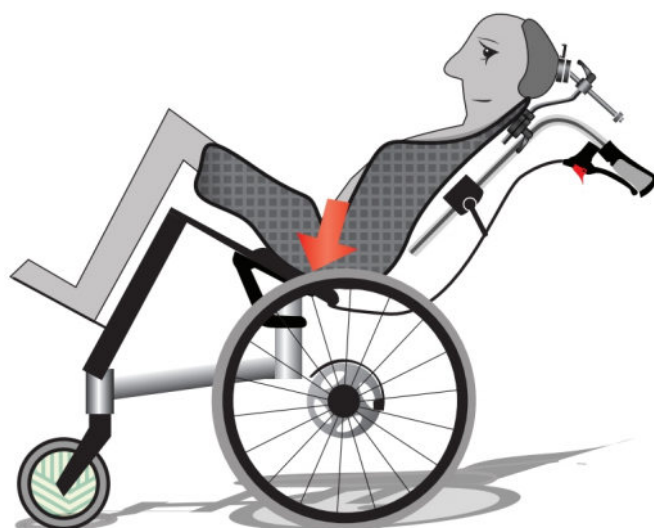


5. STRAM HOFTEBELTE

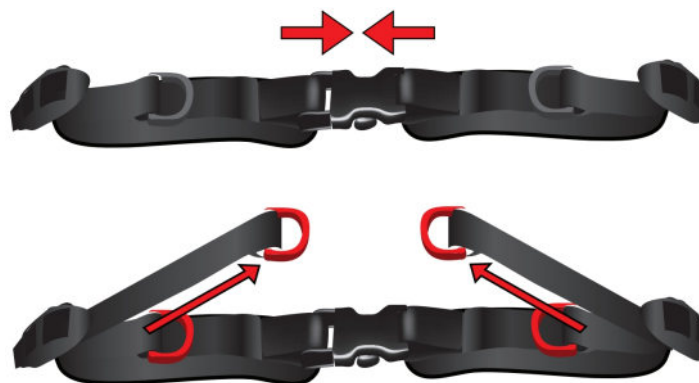

6. FEST VEST OG ANDRE BELTER

Fest neoprenvest, anklets (fotreimer) og eventuelle andre innfestninger som er tilordnet stolen.

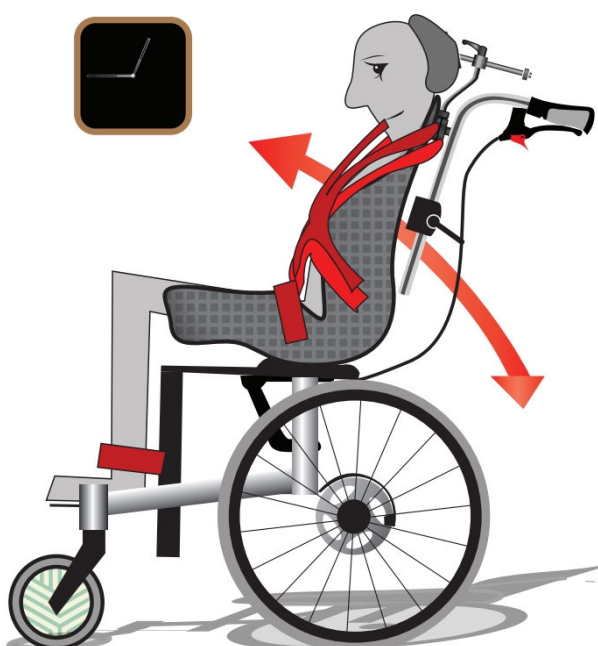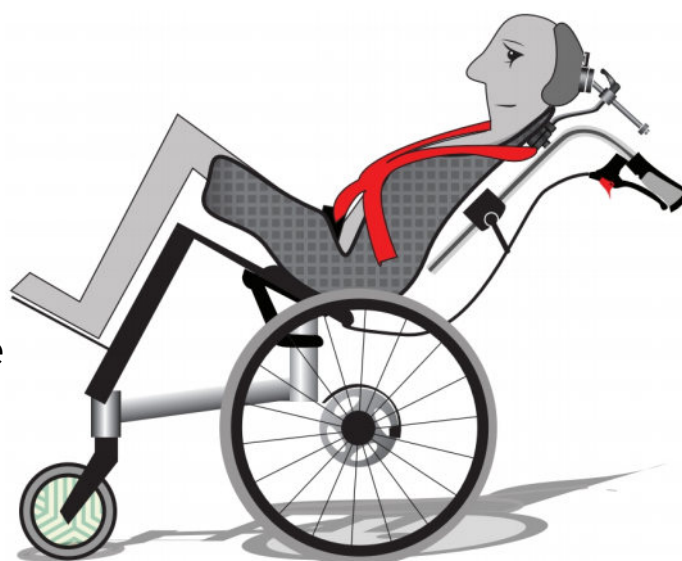

7. TILT BRUKER I RIKTIG POSISJON

over h Bruk tilt aktivt gjennom dagen for å oppnå variasjon i trykk fordeling. Sjekk med bruker hvor lang sitte frekvens denne normalt har og tilpass til dette. Det er store individuelle forskjeller på hvor lenge bruker benytter setet.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

KONTROLL AV SLITASJE

Kontroller alltid festepunkter, fikserings og posisjonerings bånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

ETTERTILPASNING

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet.

ERSTATNINGSPOLSTER

Dersom det blir behov for nye poster kan disse etter bestilles hos Ergoseat. Ergoseat opererer ikke med maksimal lagringstid av maler. Referer til ordrenummer ved bestilling.

RENGJØRINGSRUTINER

DAGLIG RENHOLD



- Løs smuss tørkes normalt av setet med en fuktig klut.
- Se ellers anvisning på polsterets vaskelapp.

POLSTER TIL SOLIDSEAT

- Setet har avtagbare polster. Håndvask er å foretrekke på grunn av slitasje, men polstrene tåler maskinvask på inntil 40°C. Vreng polstret og bruk et skånsomt vaskeprogram.
- Polstret er merket med vaskeanvisning i tillegg til nummerering.
- Vaskeanvisningen er plassert oppe på ryggdelen.



INKONTINENSTREKK

- Løse inkontinenstrekk kan vaskes på 60 °C Og lufttørkes.
- Inkontinenstrekket er antibakterielt og allergitestet.



TRANSPORTSIKRING

Ved transport av bruker i bil eller buss er det påkrevd med sikring av understell i tillegg til ordinær sikring av bruker i bil. Følgende illustrasjon gjelder for seter montert på Ergoseat` Spiser manuelt understell. Elektriske og andre manuelle understell vil ha egne transportsikringssystemer eller rutiner.



Sett deg inn i gjeldende regler for persontransport. Sjekk alltid at din sitteløsning er godkjent for persontransport i bil.

