

SPIDER



BRUKSANVISNING



WWW.ERGOSEAT.NO

BRUKSANVISNING

SPIDER

Gratulerer med ditt nye Spiser fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisninger før dette produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god og sett det tilbake i plastlommer der du fant det.

Produkt :	Ansvarlig terapeut
_____	_____
Spesialtilpasset til	HMS
_____	_____
Tilbudsnr	Leveringsdato
_____	_____



Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på www.ergoseat.no



GENERELLE RETNINGSLINJER

For å bruke rullestolen på en forsvarlig måte, må den tilpasses og settes opp av en Ergoseat godkjent rullestol ekspert.


Gjeldende retningslinjer og regler skal anvendes i tilfelle av transport i bil. Ved bruk på offentlig vei må bruker sette seg inn i gjeldende regelverk, og bruk av lys er å anbefale.

SAMSVARERKLÆRING

Vi erklærer herved på vårt eget ansvar at det ferdige produktet, Spiser som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med de grunnleggende krav og relevante standarder for EU direktiv 93/42 EU. Denne samsvarserklæringen er ikke gyldig i de tilfeller der uvøren bruk har påført skade på produktet.


Denne rullestolen har bestått krasj test ISO7176-19. Testen vil miste sin gyldighet der det ikke er montert fire røde kroker for innfestning under setet.

RULLESTOLEN

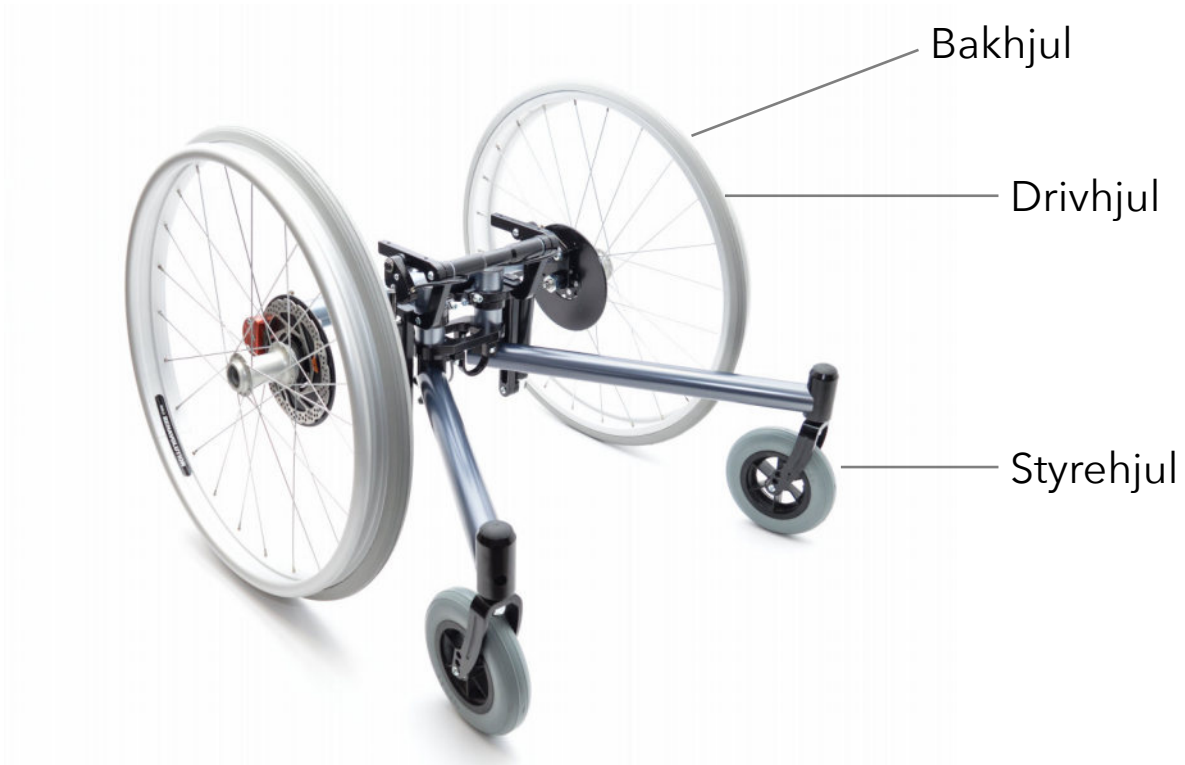

TILT

Understellet er utstyrt med en hydraulisk tilt som opereres manuelt, dette gjør at setet kan tiltes opp til 38° bakover. For å gjøre dette, må du først sette på parkeringsbremsen på bakhjulene. (Se pkt. Bremseser). Trykk på det lille håndtaket på kjørebøylen, spaken merket "tilt". Juster til ønsket tilt er oppnådd.

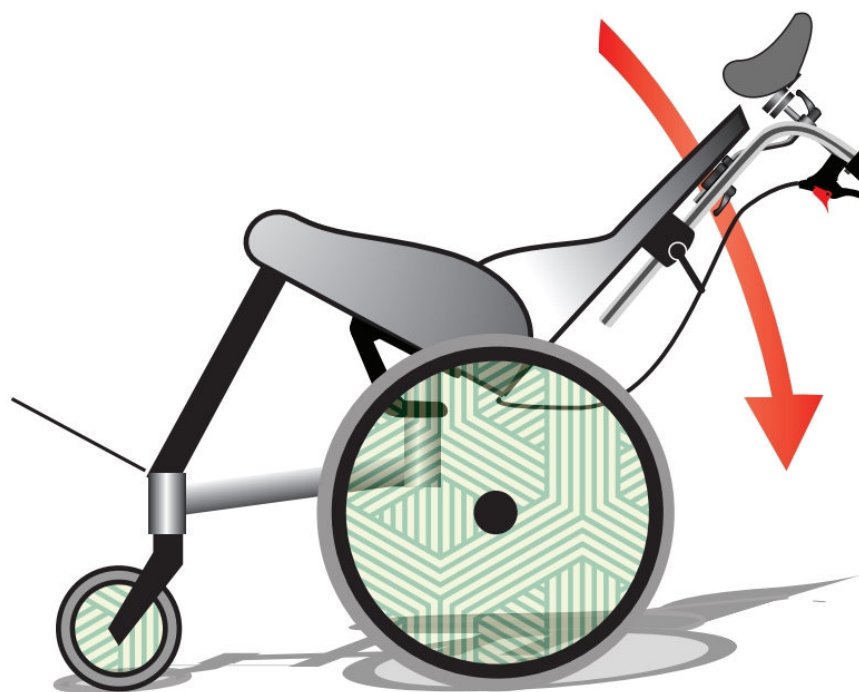

MERK: Skråstilt posisjon har økt fare for å velte stolen. Også kjøring i bakker og hindringer i denne posisjonen krever spesiell oppmerksomhet. Før stolen tiltes skal alltid Anti-tipp aktiveres.

HJUL

Det er lett å montere og demontere bakhjulene da disse hjulene er montert med hurtigkobling på aksler. Der er spesielt nyttig ved transport. Før demontering av drivhjulene, skal parkerings bremsen brukes. Trykk på knappen i midten av akselen (fig. 2a) og trekk hjulet fra rammen. For å montere, trykk den samme knappen i midten av akselen, og skyv hjulet mot rammen. Legg merke til at hjulet låser med et hørbart "klikk"(fig.2b)



Fig.2a



Fig.2b

Riktig lufttrykk er indikert på siden av dekket. Generelt gir et hardt dekk lav rullemotstand, men mindre komfort. På den annen side, gir et mykt dekk høy komfort, men økt

ANTI-TIPP

Anti-tipp er montert på baksiden av drivhjulene, enten på en eller begge sider. Disse kan felles inn ved å trykke foten mot den røde delen som er synlig på Anti-tipp. Denne vil da felles inn under rullestolen, noe som gjør det lettere å forsere hindringer som fortauskanter eller trapper. For å aktivere Anti-tipp igjen svinges den tilbake i utgangsposisjon ved bruk av foten.



MERK: At den låser ved et hørbart klikk (fig.3). Anti-tipp kan ikke aktiveres/deaktiveres av bruker selv. Ergoseat anbefaler at Anti-tipp er aktivert ved all benyttelse av rullestolen.

BREMSER

Spider er utstyrt med en integrert Shimano skivebrems som kan brukes til å bremse ned fart, for eksempel i nedoverbakker, og den kan benyttes som en parkeringsbrems.



Parkeringsbrems skal benyttes ved all inn- og utstigning av solen. For å aktivere parkeringsbremsen, skyv den svarte spaken forover. Spaken forblir nå i den stillingen. Lås hjulene ved å gi spaken en liten dytt i motsatt retning. Eller benytt låsefunksjon på ledsagerbremsen på skyvehåndtakene.

For å være sikret at bremsesystemet fungerer som det er tiltenkt, anbefaler vi å ha systemet installert og vedlikeholdt jevnlig av en Ergoseat representant. Stol aldri bare på bremsesystemet, og parker aldri i en bratt bakke eller skråning. Se for øvrig vedlikeholdsrutiner for opprettholdelse av garantier.

Advarsel: Unngå oppbremsing ved rygging eller sidehelling da dette kan medføre at stolen tipper!

TRANSPORT

Ved transport i et motorisert kjøretøy må de relevante forskrifter overholdes. Dersom ikke spider rullestolen er utstyrt med fire røde bilsikringskroker under setet, må brukeren forlate rullestolen og ta en plass i et ordinært sete av bilen.


Hvis rullestolen er utstyrt med fire røde transportfester under setet, er det godkjent for bruker transport i bil. Det er ingen garanti at ved en eventuell ulykke vil bruker være forskånet for skade. Inventar og løse gjenstander vil kunne forårsake skader på rullestolbruker eller skade rullestolen.



Transportfester

Ved transport av rullestol i bil, med eller uten bruker skal alltid:

- * Bremsen være aktivert
- * Kontrollert at løst eller avtagbart tilleggsutstyr på rullestolen er fjernet eller festet forsvarlig.
- * Understellet er festet med godkjente jekke stropper i Spiderens røde transportfester.
- * Understellet transporteres i samsvar med gjeldende direktiver og forskrifter.
- * Alltid plasseres med bruker i kjøreretning.

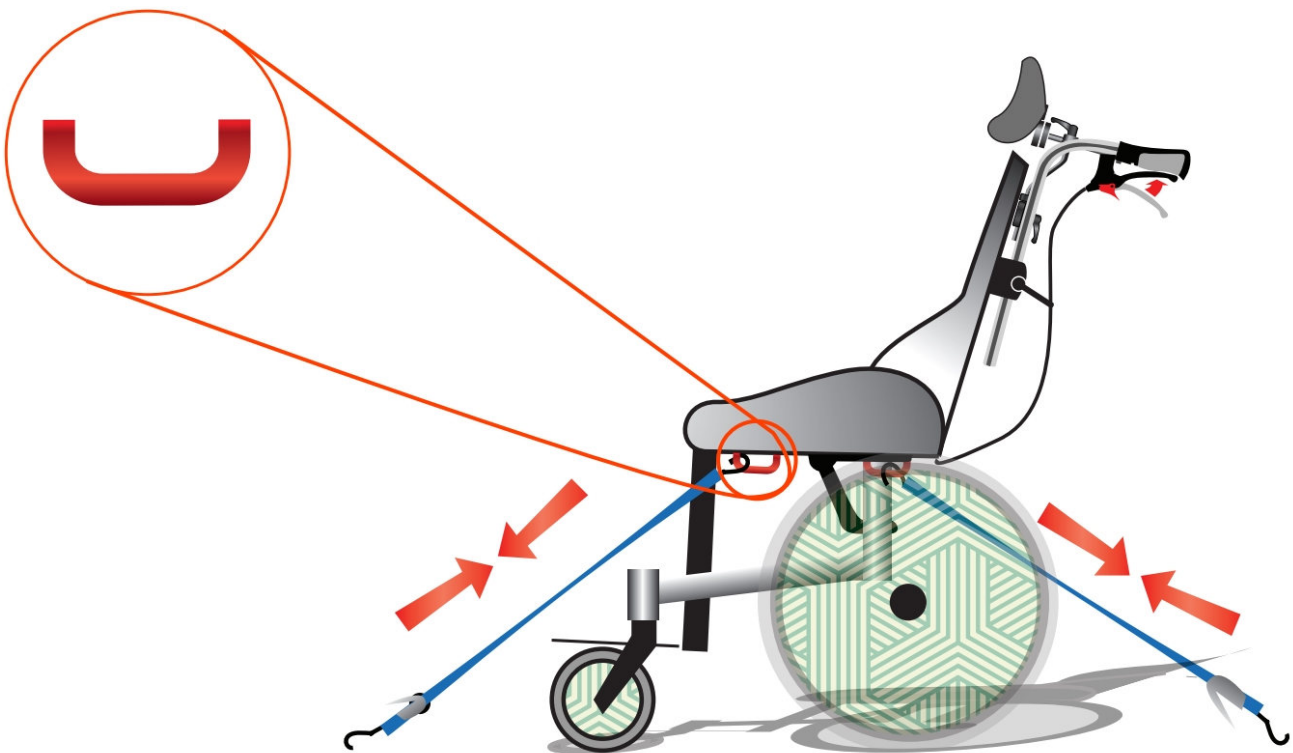

Tips: Sjekk alltid kjøretøyets anvisninger for transport av rullestoler. Bruker skal alltid sikres med eget bilbelte, festet trepunkt i bilens karosseri.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Rullestolen må vedlikeholdes riktig for å sikre pålitelig og sikker drift. Ikke bruk høytrykkspyler, da det kan skade rullestolen.

VEDLIKEHOLDSPLAN

Nedenfor finner du en nærmere gjennomgang av vedlikeholdsplanen.

Når	Hva	Hvordan
Daglig før bruk	Test bremsesystem	Sjekk at bremsene tar likt. Hjulet skal ikke rotere. Dersom ikke hjulet kan låses fullt må bremsen justeres.
Hver 4 uke	Sjekk riktig dekktrykk	Bruk trykkmåler. Visuelt inspiser etter slitasje og erstatt dekk om nødvendig.
Hver 8 uke	Sjekk dekk	Visuell inspeksjon
Hver 8 uke	Sjekk innfestninger, bolter, skruer og muttere. Kontroller at setet er festet tilstrekkelig	Visuell inspeksjon
Ved behov	Smør akslene	Fjern gammelt smøremiddel og påfør nytt.

RENGJØRING

Rengjør seteløsning med varmt vann. Trekk kan vaskes i maskin ved behov. Det er festet vaskeanvisning på hvert stofftrekk. Fjern flekker med en klut eller myk børste. Desinfeksjon kan utføres med 70% alkohol løsemiddel.

TEKNISK INFORMASJON
