

# ERGOSEAT VINTER



ERGOSEAT

BRUKSANVISNING  
BARN - LAMMEFELL



Barn 1

|  Barn 2

|  Barn 3

|  Barn 4

|  Barn 5

[WWW.ERGOSEAT.NO](http://WWW.ERGOSEAT.NO)

# KJØREPOSE VINTER

---

## **Gratulerer med din nye kjørepose!**

Vi håper den vil holde deg varm og god uansett vær og årstid. Denne kjøreposen er både designet og produsert i Norge. Du kan derfor være trygg på kvaliteten, og at vi som har designet den vet at det kan være like ufyselig vær om høsten som om vinteren. Vi har derfor integrert en del smarte løsninger i produktet du nå sitter med, og vi vil gjennomgå dem i denne bruksanvisningen.

Finner du flere smarte bruksområder for denne kjøreposen, eller måter å justere den på så ikke vær redd for å sende oss noen ord på

**[post@ergoseat.no](mailto:post@ergoseat.no)**

## **Om produktet**

Kjøreposen er produsert i det slitesterke stoffet FR-OXFORD som har flammehemmende pu-laminering. Dette gjør kjøreposen meget slitesterk. Med den gode og varme innsiden dekket med lamdefell holder du deg varm gjennom vinteren. Kjøreposen er produsert i et vind og vanntett materiale. Vannsøyle 8000.

# Rengjøring


Produktet ditt er merket med modell og størrelse på merkelappen som du finner sydd inn ved glidelåsen på høyre side inni kjøreposen. Sjekk at størrelsen stemmer med det du bestilte før du tar den i bruk.

Størrelsestabell finner du på siste side i denne bruksanvisningen.


Vaskeanvisning finner du innsydd på innsiden av kjøreposen.

## Vaskehempe


Kjøreposen din er utstyrt med en «vaskehempe» slik at den enkelt kan henges opp for drypptørking. Denne er plassert i bunn ved hælen. Fjern gjerne frontstykket slik at den tørker raskere.

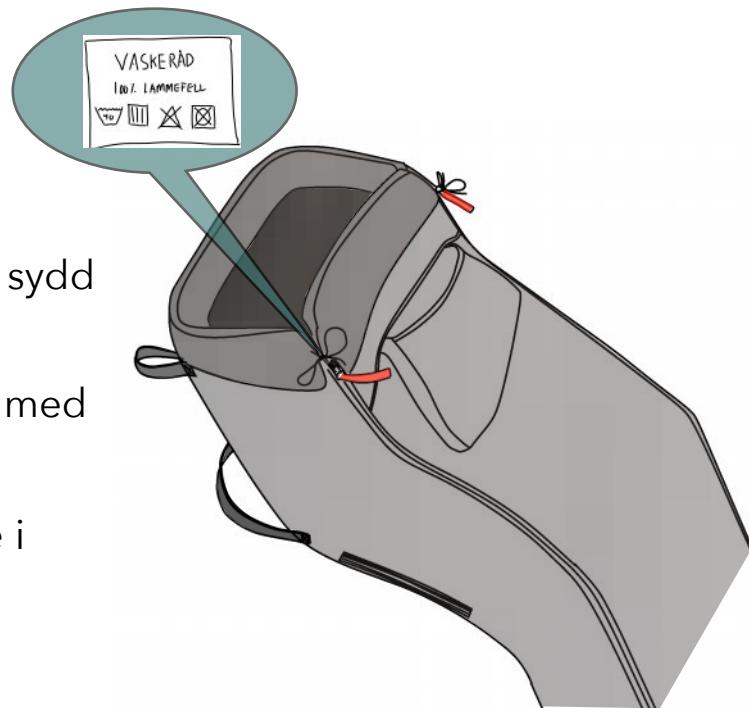


Vaskes på 30 grader ullprogram

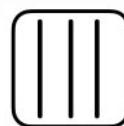

Kjøreposen må drypptørkes

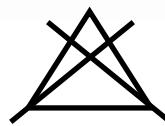


Må ikke klorblekes

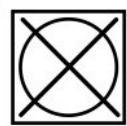

Må ikke i tørketrommel


## Refleks

Kjøreposen er diskret utstyrt med refleks som et designelement nederst i front ved føttene på begge sider. Vi har gjort dette for at du skal være synlig i høst- og vintermørket. Sørg for at disse ikke er for mye tildekket av andre ting når du beveger deg ute i trafikken.

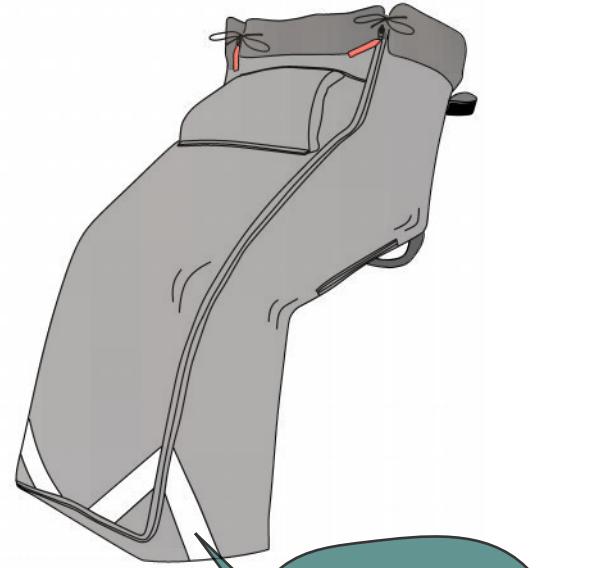


## Hoftebelte

Det er gjort forsterkninger der hvor hoftebelte kan gå igjennom kjøreposen. Ved behov for hoftebelte kan kjøreposen paspoleres og tilpasses ved at du selv setter deg i stolen med kjøreposen på. Marker deretter hvor paspoleringen skal være. Når du så er ute av kjøreposen finner du frem en saks eller skarp kniv og lager et passende hull til hoftebeltet der du markerte på forsterkningen at det må føres igjennom kjøreposen.

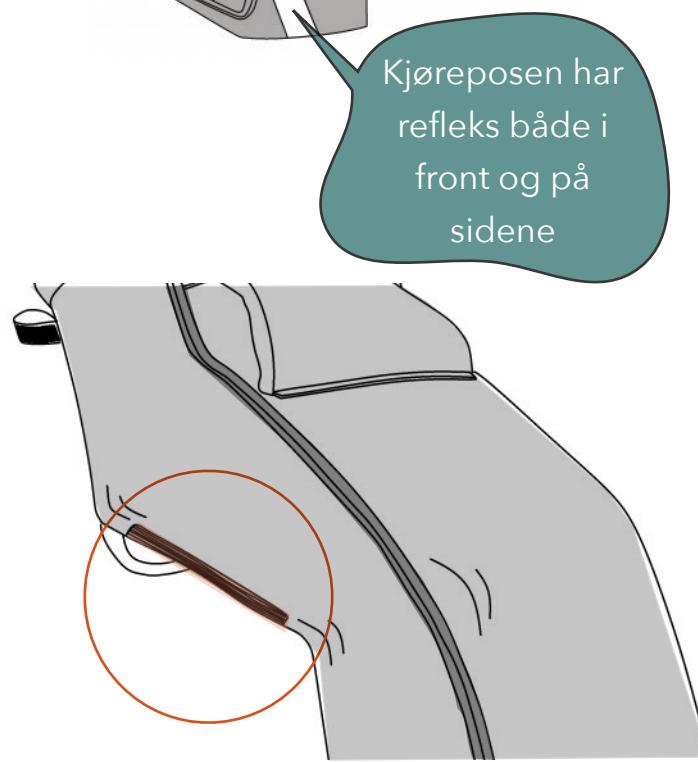


## Lomme for oppbevaring

Fremme på kjøreposen din er det en lomme. Denne kan være kjekk å ha til oppbevaring av småsaker som telefon og annet. Ved ekstremt vær kan det også fylles en varmeflaske med varmt vann som legges i lommen. På undersiden av lommen er det nemlig en muffle der du kan varme hendene dine i. En varmeflaske vil da avgive varme på en behagelig måte i lang tid til kalde fingre!

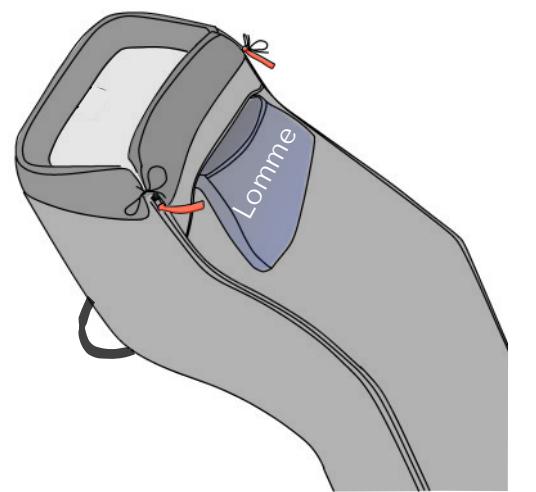


## Sikring

I setedelen er kjøreposen din utstyrt med et friksjonsmateriale slik at den skal holde seg bedre på plass i rullestolen/scooteren din. En reim med borrelås som kan tres rundt ryggen på stolen du sitter i sikrer at kjøreposen er stabil. Dette hindrer at kjøreposen bidrar til at du havner ut av posisjon. Det er viktig at du selv passer på at det ikke er bretter, sømmer eller krøll på klær eller annet som befinner seg mellom deg og setet på stolen din. Dette for å forebygge trykk/sittesår. Om du sitter lenge om gangen vær ekstra oppmerksom på dette, og om du ikke får sjekket på egenhånd så be om hjelp. Om du ikke tolererer å sitte på kjøreposen, vit at samme modell finnes uten setedel slik at man sitter direkte på original sete. Se gjerne [www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no) for mer informasjon.

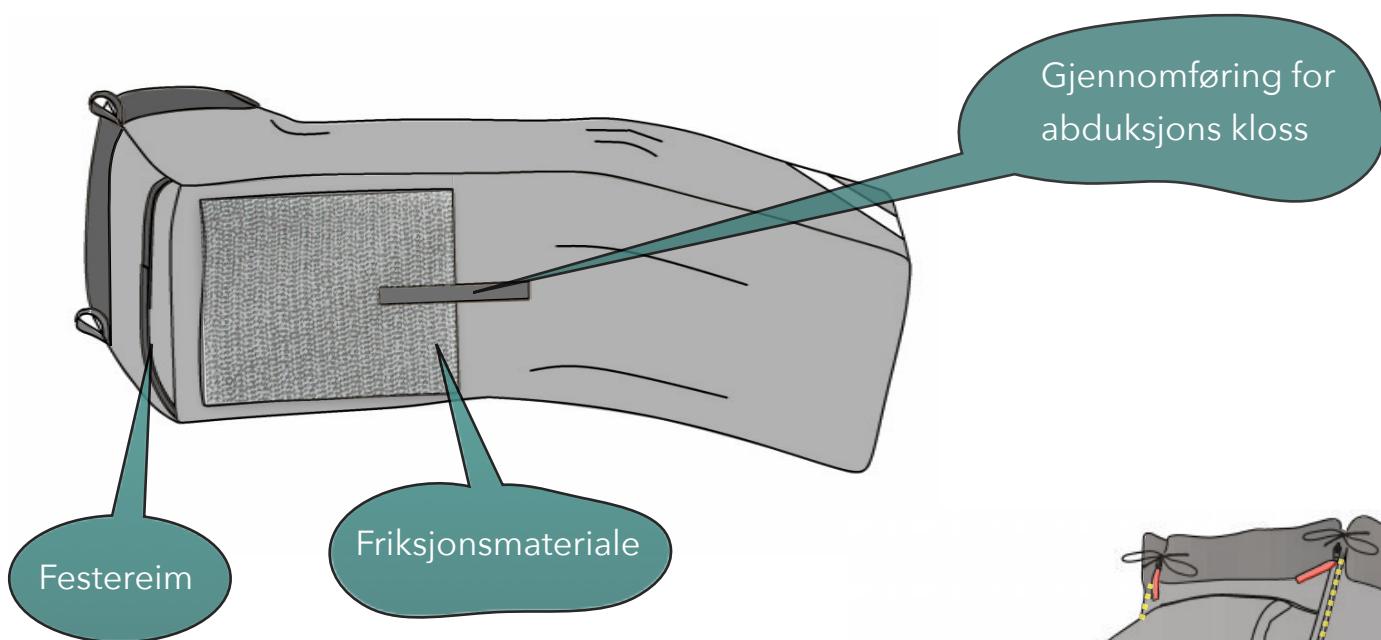


## Glidelås

Kjøreposen din er utstyrt med glidelås som gjør det mulig å ta av hele frontstykket. Vit at dette er en mulighet, selv om åpning fra begge sider sjeldent medfører at dette skulle være nødvendig.

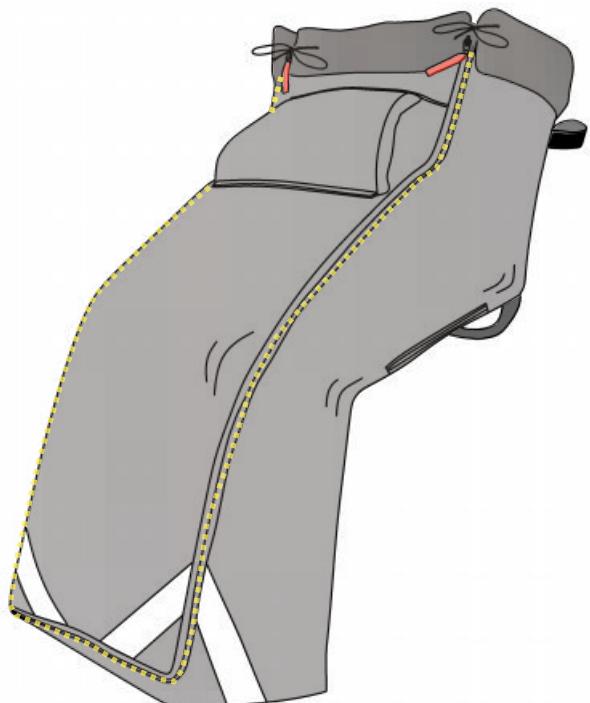


## Gripering

I kjøreposen følger det med en gripering som forenkler måten å dra opp og ned glidelåsen. Griperingen er lett å få tak i med fingrene eller man kan ta hele håndleddet igjennom å dytte eller dra.

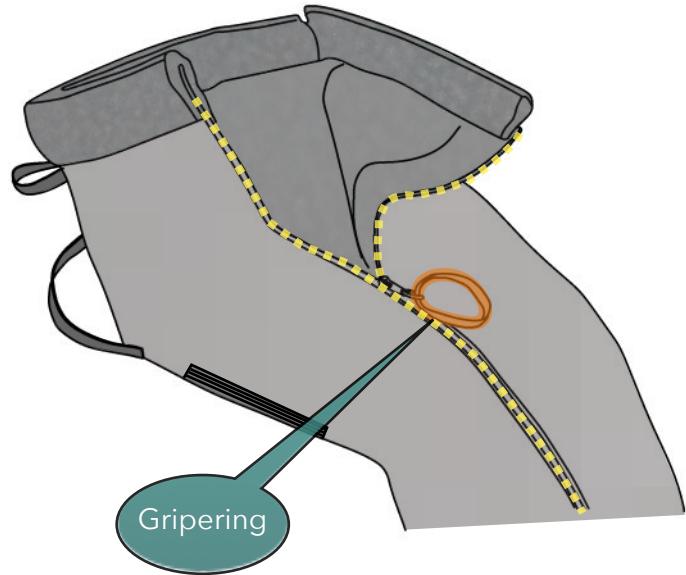


## Strikk i livvidden

Kjøreposen har strikk på begge sider, som gjør at kjøreposen sitter tett til kroppen. Dette resulterer i mindre varmetap.

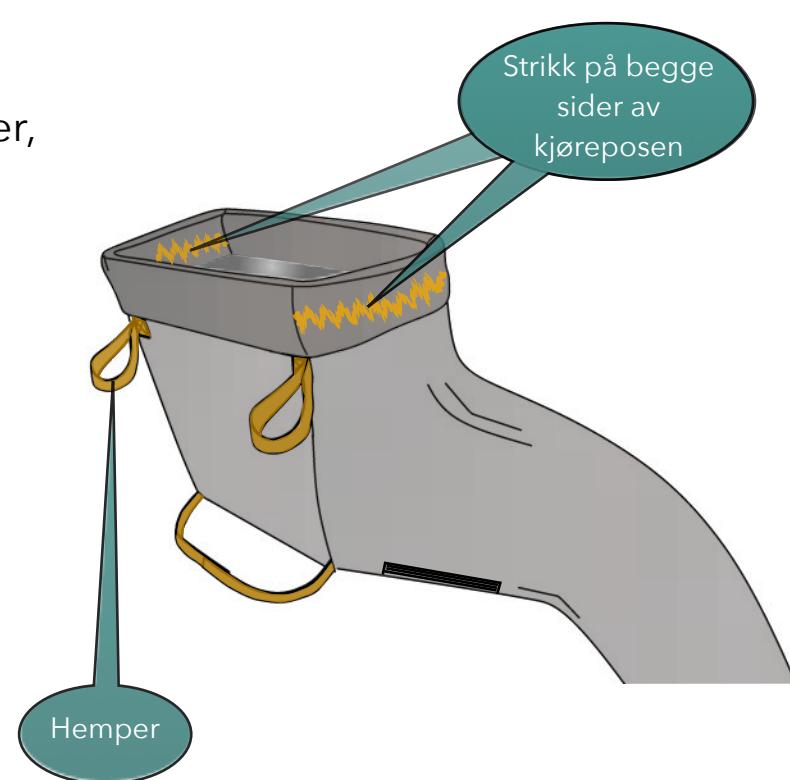

## Feste og sikring


Bak på ryggen til kjøreposen finnes det hemper i kraftig strikk som kan tres over eventuelle kjørehåndtak. Dette sikrer at kjøreposen er fast i rullestolen.

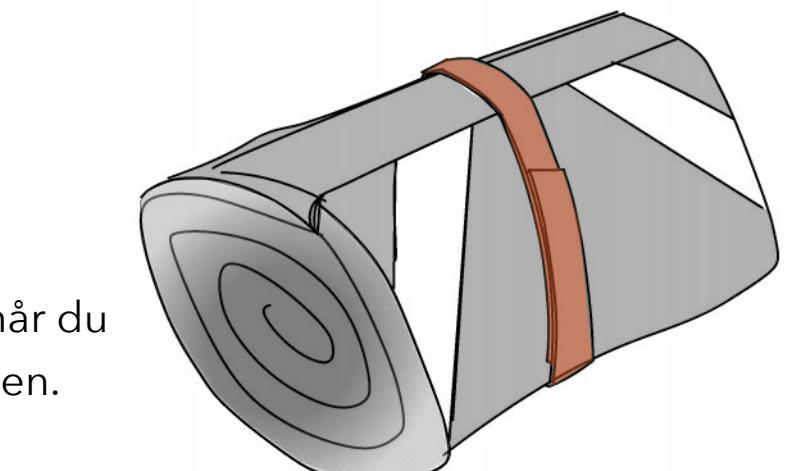

## Oppbevaring og transport

Borrelås remmen som er bak på setedelen benytter du som sikring når du skal rulle den sammen for å frakte den.

# Målsetting

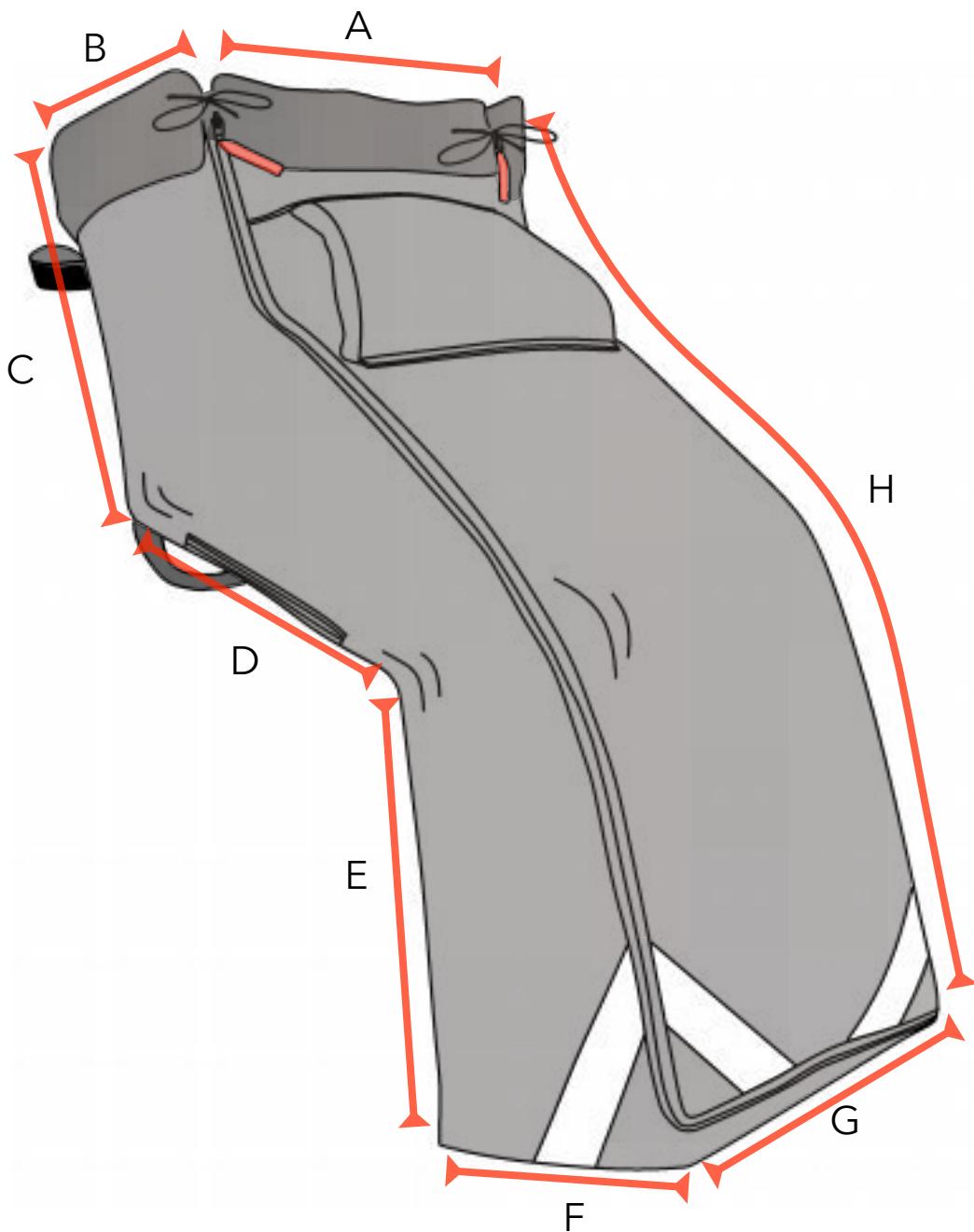

Størrelse	A	B	C	D	E	F	G	H	Høyde	Alder/år	ES.nr
Barn 1	29	17	27	28	19	16	29	60	92-104	0-4	ES14103
Barn 2	31	18	29	31	28	20	31	75	104-116	4-6	ES14107
Barn 3	33	20	31	35	37	23	33	90	116-128	6-8	ES14111
Barn 4	35	25	36	40	40	27	35	97	128-140	8-12	ES14115
Barn 5	37	30	42	44	43	31	37	105	140-165	12-14	ES14119

(Målene er oppgitt i cm)



## Kontakt oss



**WWW.ERGOSEAT.NO**



**POST@ERGOSEAT.NO**



**55101600**



**LØNNINGSFLATEN 28  
5258 BLOMSTERDALEN**

