

STYRTUR



ERGOSEAT

BRUKSANVISNING



WWW.ERGOSEAT.NO

BRUKSANVISNING STYRTUR

Gratulerer med ditt nye produkt fra Ergoseat!

Vi håper du vil være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. For å kunne betjene produktet på en trygg måte, og sikre størst utbytte og glede av det er det viktig at du leser hele dette heftet før det tas i bruk. Ved større endringer i funksjonsnivå, vekt eller andre forutsetninger er det viktig at man konsulterer Ergoseat for å sikre at hjelpemiddelet fremdeles kan benyttes på en forsvarlig måte. Ergoseat står ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå ved bruk av dette hjelpemiddelet.



Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på www.ergoseat.no



INNOVATIVT OG FLEKSIBELT

Styrtur er et dusj og toalettsete for barn/ungdom. Det leveres med to ulike størrelser av sete og ryggpolstring og passer de aller fleste personer som har behov for enkelt å kunne forflyttes i en dusj og toalettstol. Styrtur vil ved justering i standard utførende passe personer mellom 105-145cm, men kan ved bruk av tilbehør også tilpasses personer som er høyere eller lavere enn dette. Produktet er tatt frem for å møte behovet hos brukere med nedsatt, eller ingen gangfunksjon. Setet og ryggen er utformet for å gi posisjoneringstøtte til brukere med nedsatt sitte stabilitet, og kan benyttes som en dusjstol, eller toalettløsning over toalett eller med bekken. Hele konstruksjonen er vanddrenerende, produsert i materialer som ikke ruster, korroderer eller på andre måter forringes ved normal bruk. Dette gjør det svært rengjørings og brukervennlig. Polstringen på sete og ryggflate kan enkelt fjernes for å underlette daglig renhold. Setet kan tiltes, slik at det underletter posisjonerings forandringer fra toalett situasjon til bruk i dusj. De medfølgende distanse-stykkene gjør at det også kan høydejusteres til å passe over de fleste toalett.

STANDARD UTFØRELSE OG UTSTYR

Dette dusj og toalettsetet leveres standard i følgende utførelse og med nevnt utstyr: Standard hvit utførelse med rygg og setepolstring i blå plaztasot. Dusj og toalettsetet leveres standard med to ulike sett av rygg og setepolstring. Disse er merket med størrelse 1 og 2, men kan kombineres for å best imøtekomme brukers krav. Justerbar hodestøtte, ut og oppfellbare høydejusterbart armen. Avtagbare høyde og vinkeljusterbare fodstøtter. Hoftesele og bekken, og fire låsbare hjul. Manuell tilt, og høydejustering ved bruk av distansestykker.



MÅL OG VEKT

BESKRIVELSE	IA	MED HEVESETT	UTEN HEVESETT	STR 1	STR 2
VEKT	21KG				
MAKS BRUKERVEKT	70KG				
UTVENDIG BREDDE	56				
TOTAL HØYDE UTEN NAKKESTØTTE			98CM	92CM	
TOTAL LENGDE(UTEN FOTPLATE)	68CM				
SETEBREDDE	37CM				
SETEDYBDE				30CM	38CM
SETEHØYDE		61CM	55CM		
TOALETTHØYDE (FRIHØYDE)		47CM	41CM		
RYGGHØYDE				33-45CM	34-48CM
LEGGLENGDE	18-33CM				
TILT	20°				
VINKEL FOTBRETTINNFESTNING	15°				
TOALETTÅPNING(DIAMETER)				14CM	17CM
BREDDE MELLOM ARMLEN STANDARD	30CM				
BREDDE MELOM ARMLEN MED TILBEHØR ES60303	39CM				
MAKS HØYDE					150CM

JUSTERINGER

Styrtur har en rekke justeringsmuligheter, for å kunne adapteres til ulike behov og endringer hos bruker. Det kan være endringer i dagsform, eller endringer av varig karakter. Det som er viktig er at det ikke justeres noe som går ut over understellets egenskaper og endrer sikkerheten. Generelt kan man si at justeringer som kan foretas av de aller fleste er mulig å utføre uten bruk av verktøy. Justeringer og tilpasninger som krever bruk av verktøy bør kun utføres av Ergoseats kvalifiserte personell, med mindre man er helt trygg på det man gjør. Konferer med dette heftet dersom du er usikker, eller henvend deg direkte til oss i Ergoseat. Der et viktig å være innforstått med at alle justeringer vil forandre dusj og toalettstolens tyngdepunkt, sjekk derfor også i tiltet posisjon. Utvis derfor den største forsiktighet ved alle endringer i innstillinger!



HODESTØTTE

Justering utføres ved å trekke i låsesplint C* på bildet. Hodestøtten er da fristille og kan posisjoneres i ønsket høyde B*. Slipp låsesplinten og nakkestøtten skal låse seg automatisk ved at splinten går inn i ett av de mange hullene. For å tilte nakkeputen, løsne skruen D* tilt til ønsket posisjon og stram skruen. Dybden justeres ved å løsne låsespake A*

POLSTRING

Styrtur leveres med to ryggpolstringer, og to setepolstringer. Disse er merket med størrelse 1 og størrelse 2. Disse kan kombineres i totalt 4 ulike kombinasjonsmuligheter. I tillegg kan ryggene justeres i høyden ved å flytte polstringen i ryggplaten. Setets materialvalg, plasztasot, har en lukket cellestruktur. Det betyr at det ikke absorberer fuktighet. Tilpasninger av rygg eller setepolstring kan om ønskelig gjøres ved å kutte eller slippe i materialet for å gi økt komfort for bruker, uten at produktets kvalitet forringes. Dette er en klar fordel der bruker har behov for tilpasninger for å oppnå maksimalt utnyttelse av produktet. For å sikre ett enkelt renhold er alle polstringer mulig å fjerne uten bruk av verktøy, de bare presses på plass for å sikre korrekt posisjon. Polstring av armlen, fotplate og annet er mulig ved å benytte tilbehør. (Se tilbehør)



FOTBRETT OG INNFESNING

Fotbrettet er vinkeljusterbart ved kneet. Løsne rattskruen på begge sider til den frigjøres fra sporet sitt, deretter kan man justere vinkelen og plassere rattskruen igjen i en ny posisjon. Om hele fotbrettet inklusive innfestningen ønskes fjernet skrur man rattskruen på begge sider helt ut, og trekker hele fotbrett-innfestningen frem slik at den frigjøres fra seterammen. Den festes igjen ved å reversere nevnte prosedyre.




HØYDEJUSTERING FOTBRETT

Fotplaten kan høydejusteres eller fjernes etter behov. Klem sammen låsespakene A* på bildet slik at disse frigjøres fra sporet i fotbrett-innfestningen på begge sider. Løft deretter fotplaten opp fra sporet, og trekk den frem slik at den kan løftes eller senkes til den posisjonen man ønsker. Slipp låsespakene når fotplaten er plassert i ønsket posisjon. Fotplaten er da sikret.



TILT

Stolen har 20° tilt, som betjenes manuelt via spaken som er lokalisert ved kjørehåndtaket på høyre side bak på stolen. Klem inn håndtaket samtidig som man holder begge kjørehåndtakene. Sete kan da tiltes til ønsket posisjon og låses ved å slippe tiltspaken når ønsket posisjon er oppnådd.

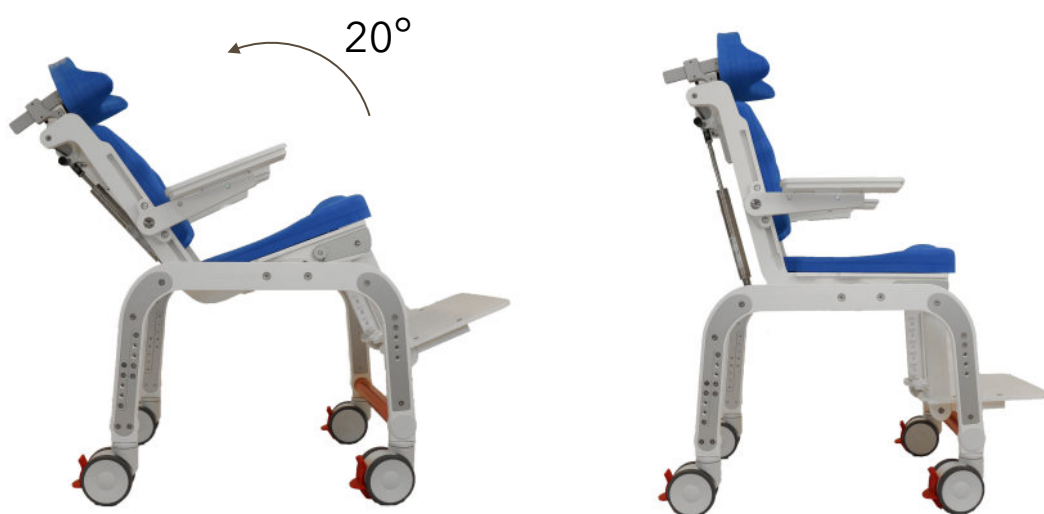

BREMS

Styrtur leveres med fire individuelt låsbare hjul. Sikre deg alltid at hjulene er låst når bruker sitter i stolen. Vi anbefaler at bremsene alltid er aktivert med mindre stolen er under forflytning. Bemerk også at ujevne baderomsgulv kan medføre at bremsefunksjon kan bli redusert på ett eller to hjul! Sikre deg alltid at stolen står trygt før den forlates med bruker i. Hjulenes brems aktiveres ved å trå på bremse pedalen vist på bildet. Den frigjøres ved å heve pedalen ved å løfte den med foten.



BEKKEN

Stolen leveres standard med bekken. Dersom dette ikke benyttes kan hele festet fjernet ved å skru ut de to skruene som holder dette i aluminiumskinnen i framkant. Ved betjening av bekken festes dette og fjernes dette via setets bakkant. Man skyver enkelt bekkenet på plass i festet, og fjerner det på samme måte. **Lokk til bekken finnes som tilbehør.**




BELTE

Beltet er ment som ett sikringstiltak for at bruker ikke skal kunne falle ut av stolen ved bruk. Det justeres ved å stramme eller slakke det ved innfestningen i siden på stolen. Ved behov for mer presis belteløssning kan man bytte innfestningspunkt i seterammen, eller bytte til et korrigerende hoftebelte. Alternativt kan også neoprenvest benyttes. Det medfølgende beltet har plastspenne, og åpnes og lukkes ved å klemme inn klips på beltets spenne. Juster til beltets størrelse ved førstegangs bruk slik at det sikrer bruker på en tilfredstillende måte.




HØYDEJUSTERING

Styrtur kan tilpasses i høyden. Dette for å passe over ulike toalett, eller gi bedre arbeidshøyde for personell. Stolen leveres med distansestykker og disse må monteres for å endre høyde. Alternativt kan man setet heves 2,4 eller 6 cm fra levert høyde. Merk at distansestykkene er nummerert, og kun kan plasseres på korrekt måte. For å heve setet, fjern skruene på bildet fullstendig, og plasser de ønskede distansestykkene. Sett fast skruene igjen og gjenta dette på alle fire bena til korrekt og lik høyde er oppnådd. Ta vare på distansestykkene slik at stolen kan justeres tilbake til utgangshøyde ved en senere anledning om det er behov for det.

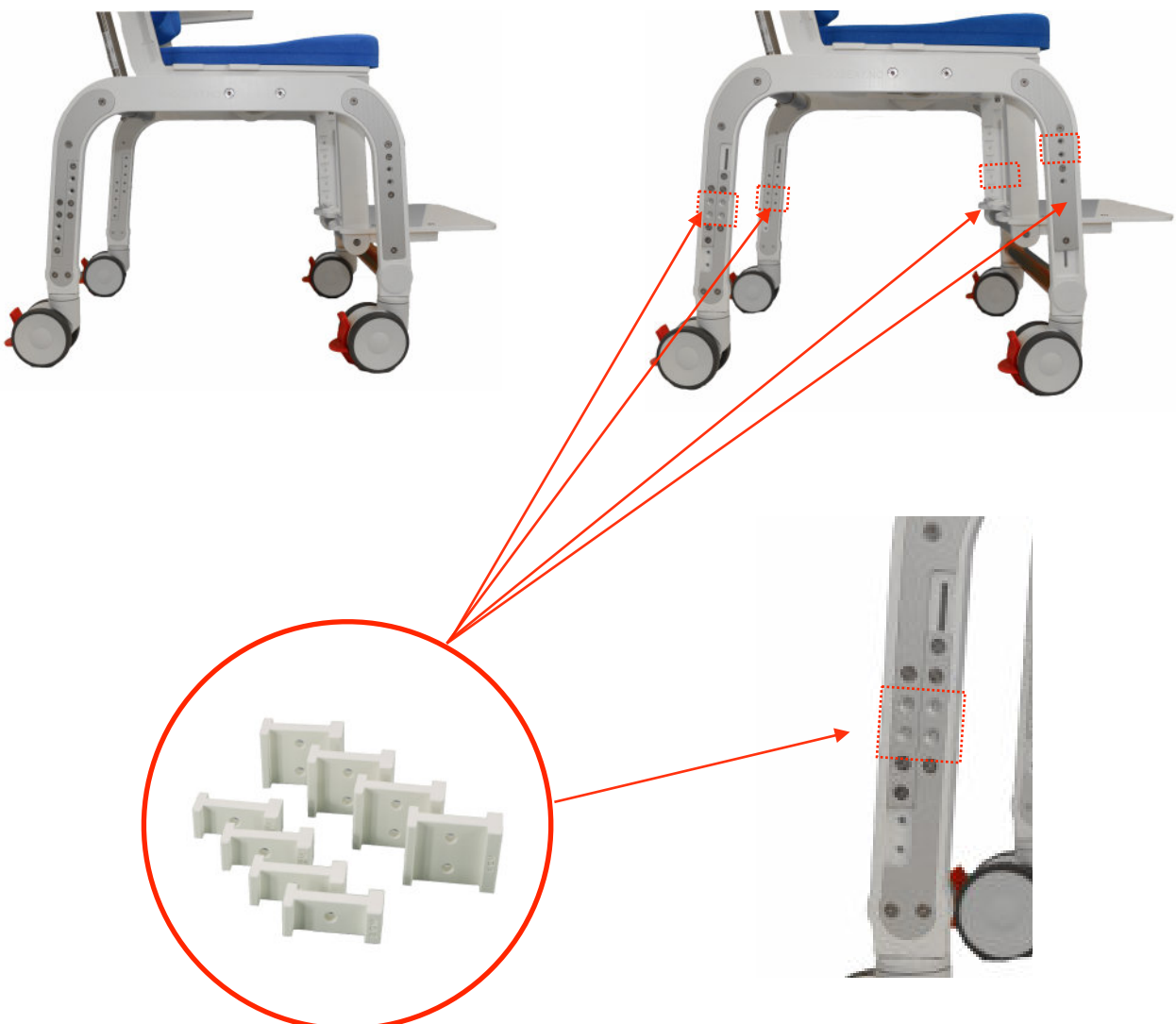

ARMLEN

For å underlette forflytning av bruker, eller bedre tilgjengelighet ved stell/dusjing kan armlenene enkelt vippes bort. Dette gjøres ved først å vippe armlenet ut til siden, deretter elle hele støtten opp og bakover mot ryggen som på bildet.

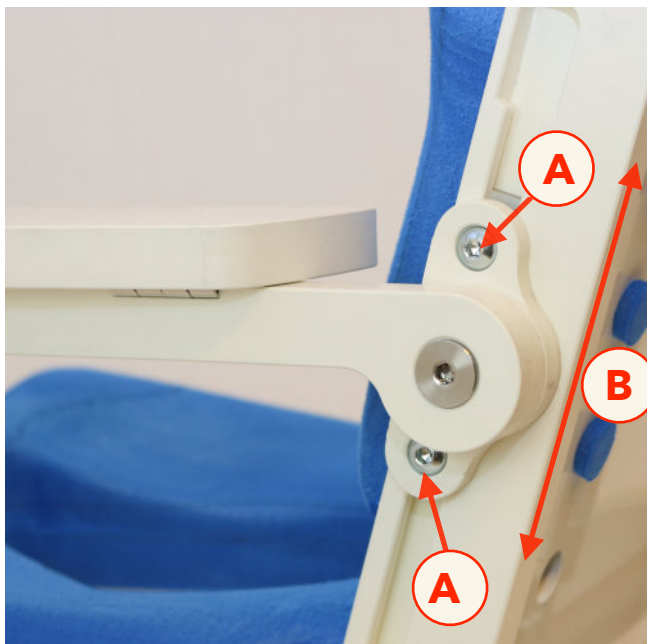






Armstøtten kan justeres i høyden ved å løsne de to skruene A* på bildet. Deretter hev eller senk armlenet B* til ønsket posisjon. Ved behov kan de justeres i ulike høyder på henholdsvis høyre eller venstre side. Om rammen ikke benyttes eller ønskes kan de fjernes helt ved å skru ut skruene helt.

TILBEHØRSOVERSIKT

Styrtur kan tilpasses ved å benytte en rekke tilbehør. Dette sikrer optimalisering av produktet, slik at brukers funksjonsnivå og komfort opprettholdes eller forbedres. Om det er tilbehør du ikke finner i liste så gjør du en henvendelse til Erogseat så kan vi hjelpe deg!

	ART.NR	HMS.ART.NR	BESKRIVELSE
	ES60404	242997	POLSTRING FOTPLATE
	ES60504	242999	LOKK TIL BEKKEN
	ES60302	242996	POLSTRING ARMLEN
	ES60506	243002	BOLSTØTTE
	ES60405	243003	LEGGSTØTTE
	ES60505	243004	URINSKJÆRM
	ES60103	243008	HEL POLSTRING STR 1
	ES60104	243009	HEL SETEPOLSTRING STR 2

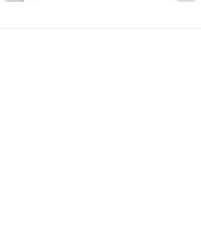	ART.NR	HMS.ART.NR	BESKRIVELSE
	ES60701	243005	NEOPRENVEST STR 1
	ES60702	243006	NEOPRENVEST STR 2
	ES60703	243007	NEOPRENVEST STR 3
	ES60403	243000	LANG FOTBRETT INNFESTNING
	ES60202	242998	NAKKESTØTTE MED AVANSERTE JUSTERINGSMULIGHETER
	ES60303	243001	ARMLLEN FOR STØRRE BOLBREDDE
	ES60304		SETEBØYLE 50-62CM JUSTERBAR

RENGJØRINGSRUTINE



RENGJØRINGSRUTINE

For å forebygge kalkavleiring, og ansamling av såpe og sjmporester bør setet og understell jevnlig tørkes av.

KONTROLL AV SLITASJE

Kontroller alltid festepunkter, fikserings og posisjonerings bånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

ETTERTILPASNING

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet.

